神奈川県火災共済協同組合組合員の皆さまへご案内

今、できる事からはじめよう! おウチでできるセルフ・ヘルスケア

ご存知ですか?

自宅"でできる がんリスク検査



だ液によるがんリスク検査 SalivaChecker®

価格: |2, |00円(税込)

サリバチェッカー
おすすめの理由 //

度に複数のがんリスクが分かる!



膵がん 胃がん 大腸がん 乳がん









自分も家族も安心

早期発見ができれば治療の負担 も少なく、家族も安心です。



痛くない

数滴のだ液を採取するだけなので、 体に負担をかけません。



確かな臨床研究

検査技術の基礎となった研究は、 多くの論文が国際的な学術誌に 掲載されています。



どうしてだ液でがんのリスクが分かるの?

がん細胞からしみ出す れるからです。

だ液は「身体の鏡」といわれ、血液や尿と同じように健康状態の指標となる 多くの情報を含みます。だ液中の成分の大部分は血液由来のため、がん細胞 からしみ出す代謝物は血管を通り、だ液中にしみ出します。サリバチェッ カーは、最新の測定装置を用いてこれらの物質を分析・解析します。



がん細胞の増殖



ポリアミンなどの 代謝物が血中に漏れだす



血液からだ液腺を通って だ液中に分泌



だ液中の代謝物濃度を測定・解析



Alを活用して部位別にかんリスクを評価

サリバチェッカーは、慶應義塾大学先端生命科学研究所での研究成果をもとに開発 された新しい検査です。検査のしくみやリスク評価方法については、サリバテック のホームページに詳しく掲載しています。







● 検査の申し込み

下記のお申込方法・注意事項をご確認 の上、お申込みを行ってください。



02 検査キットが自宅に届く



お申し込み後キットが届きます。 キットを冷凍庫で3時間以上冷凍さ せます。※内包の保冷剤は固まらな いタイプです。

03 だ液を少量とって送る



だ液を採取します。採取時間は2~5分程度です。採取後、冷凍庫で凍らせた上で、同意書とともに箱に入れ、冷凍便で返送します。

04 分析·検査

だ液中のがん特有の代謝物質の濃度を分析することで、がんのリスクを調べます。



05 検査結果

だ液が検査所 に到着してか ら約1ケ月以内 に検査結果を 郵送します。



● 検査を受けた後は

がんのリスク値が高い場合は、かかりい場合は、かかりりに い場合は、かかりいが たいりな社提携の医療 機関に相談されることをお勧めします。





<お申込み概要>

・対 象 者:神奈川県火災共済協同組合の組合員

· 検 査 費 用:12,100円(税込)

<お申込み方法>

以下のURL、もしくはQRコードよりキャンペーンコードを確認の上お申込み下さい。

https://www.salivachecker.com/?campaigncd=kanagawakyosaiuni



<注意事項>

- ・本検査は遺伝的検査のように将来的な罹患リスクを調べるものではなく、今現在、がんに 罹患している可能性を調べる検査です。
 - また本検査により得られる情報は医師の診断に代わるものではありません。
- ・本検査結果(リスクの高/低)を問わず、身体に何等かの自覚症状がある方は 速やかに医療機関を受診ください。
- ・本検査に関するお問合せは以下の連絡先までお願いします。 【株式会社サリバテック】

https://www.salivachecker.com/contact 0235-26-7655

〈検査キット開発元/検査・測定機関〉 SalivaTech 株式会社サリバテック 住所/山形県鶴岡市覚岸寺字水上 246 番地 2

【商品トラブル、不具合の場合】検査キットに瑕疵がある場合、弊社負担で交換を承ります。また、お客様都合による返品はお受けできません。

